

## Інструкція із застосування Спрей назальний ізотонічний МАРИМЕР бебі®

UA

Спрей назальний ізотонічний МАРИМЕР бебі® - натуральний продукт, який є стерильним фізіологічним розчином морської води з мікродифузною системою впорскування.

Від природи збагачений мінеральними солями та морськими мікроелементами, **спрей назальний ізотонічний МАРИМЕР бебі®** рекомендовано для немовлят та дітей молодшого віку для щоденного очищення носових ходів та зволоження слизової оболонки носа при сухості.

Мікродифузна система впорскування в **спреї назальному ізотонічному МАРИМЕР бебі®** полегшує промивання носових ходів.

Спеціальна захисна насадка сприяє безпечному застосуванню спрею новонародженим.

**Спрей назальний ізотонічний МАРИМЕР бебі®** можна застосовувати у будь-якому положенні тіла.

Належна гігієна носа допомагає захищати слизові оболонки від несприятливих факторів зовнішнього середовища (холодні погодні умови, алергени, сухе або забруднене повітря тощо) та забезпечує нормальне дихання носом. Немовлята у віці до 6 місяців дихають тільки через ніс.

### СКЛАД

100 % стерильний ізотонічний розчин морської води, що еквівалентно солі 9 г/л.

### ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

**Спрей назальний ізотонічний МАРИМЕР бебі®** рекомендується для немовлят та дітей молодшого віку:

- для щоденної гігієни носових ходів;
- для зволоження слизової оболонки носа при сухості;
- як додаткова складова при захворюваннях ЛОР-органів.

### ДОЗУВАННЯ

1 впорскування у кожен носовий хід, бажано перед кожним прийомом їжі, 1-4 рази на добу, за потребою.

**Спрей назальний ізотонічний МАРИМЕР бебі®** можна застосовувати щодня протягом тривалого періоду.

### ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ.

- Рекомендується покласти немовля, або розмістити дитину у сидяче або стояче положення.
- Нахиліть голову вбік.
- Обережно вставте насадку у ніздру та вприсніть **спрей назальний ізотонічний МАРИМЕР бебі®** у верхній носовий хід.
- Повторіть процедуру з іншим носовим ходом.
- Поверніть голову у вихідне положення, щоб дати носовим виділенням витекти.
- Для новонароджених видаліть залишки розчину серветкою. Використовуйте дитячий назальний аспіратор у випадку рясного витікання для обережного видалення носових виділень.
- Дітям молодшого віку: попросіть дитину самостійно звільнити ніс від носових виділень.

### ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ.

Дозуючий пристрій слід очищати мильним водним розчином після кожного застосування. Промити та витерти.

## УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ.

Застереження. Флакон під тиском: може лопнути при нагріванні. Тримайте подалі від джерел тепла, іскор, відкритого полум'я, гарячих поверхонь та будь-яких інших джерел запалювання. Курити заборонено в безпосередньої близькості з флаконом. Не проколювати та не спалювати навіть після використання. Захищати від сонячних променів. Зберігати при температурі не вище 50°C.

### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не застосовувати недоношеним дітям

ЗБЕРІГАТИ ПОЗА ПОЛЕМ ЗОРУ ТА В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ.

Не використовувати після дати закінчення терміну придатності, що вказана на флаконі.



Laboratoires Gilbert  
928, Avenue du General de Gaulle,  
14200 Herouville Saint-Clair - FRANCE

### Найменування та місцезнаходження уповноваженого представника в Україні:

ТОВ «Фарма Старт»

Україна, 03124, м. Київ, бул. І. Лепсе, 6.8

### Пояснення символів, що застосовуються



0459



UA.TR.039



Виробник



Дата виробництва



Партія



Дата закінчення терміну придатності



Уважно прочитайте інструкцію із застосування



Зберігати при температурі не вище 50°C



Стерильно